


Használati útmutató

TOKUYAMA BOND FORCE

- Mielőtt elkezdené használni az anyagot, kérjük, figyelmesen olvassa el az instrukciókat!



Kicseppentés

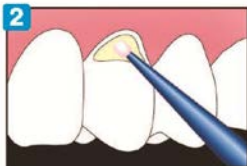

Vigye fel az anyagot a felületre!



Dörzsölje le a felesleget!



Szárítsa 5 másodpercig gyengén, majd 5 másodpercig erősen a felületet!



Világítsa meg 10 másodpercen keresztül!

Figyelem!

Az anyag esetleges szövetelfehéredést, illetve allergiás reakciókat válthat ki. Mindez elkerülése végett kérjük, olvassa el a használati utasítást!